


PHILIPS

Healthcare

ピコネーガルマスク
Pico mask

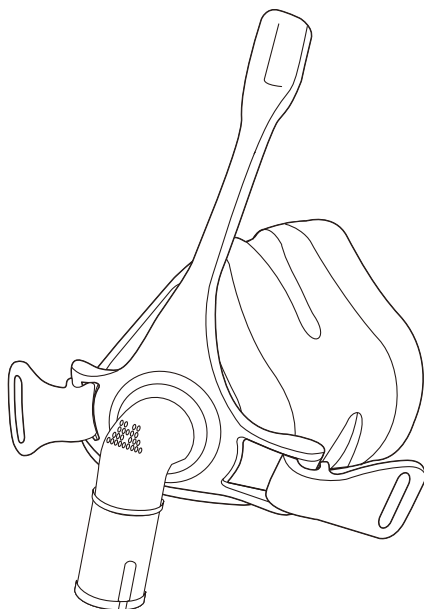

マスク及び CPAP付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客様コールセンターまでお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから
各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス




パソコンから

フィリップス

検索

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある
「個人向け」➡「健康」➡「呼吸器・睡眠関連機器」➡
「患者さん」➡「マスク」へアクセス

ヘッドギアとマスクの名称

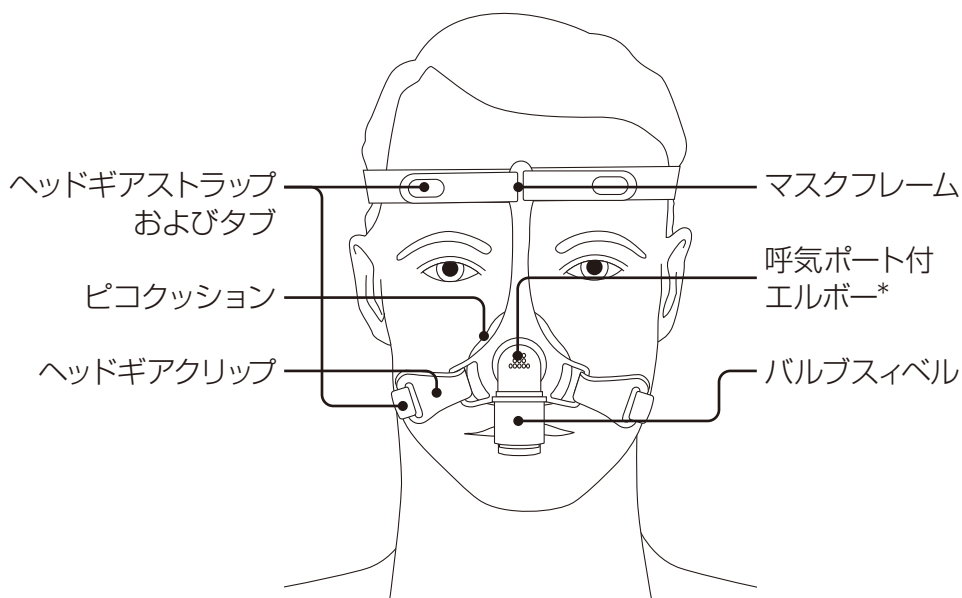


正しい装着図

*呼気ポートは塞がないでください


1 マスク装着の手順 (1)

ヘッドギアクリップの片方をフレームから外します。
マスククッションを鼻にあて、
クッション部分をささえながら
ヘッドギアをかぶります。

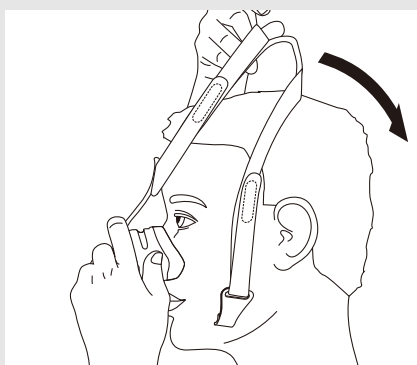


マスク装着の手順 (2)

ヘッドギアクリップの片方を元の位置に取り付けます。

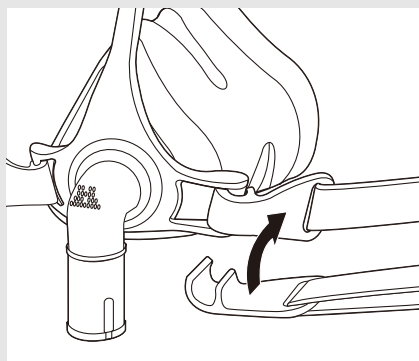


上部ストラップと下部ストラップを左右均等に、締めすぎないように注意しながら調整します。

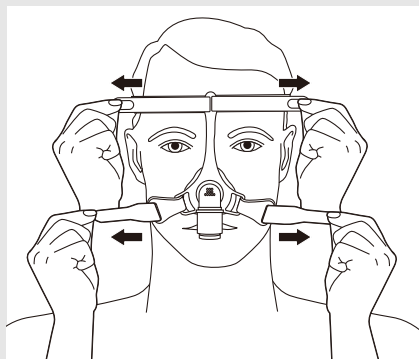



マスクを取り外す際は、クッション部分を手で押さえながらヘッドギアを前方にずらして取り外します。

※クッション部分を持ちあげながら取り外さないでください。

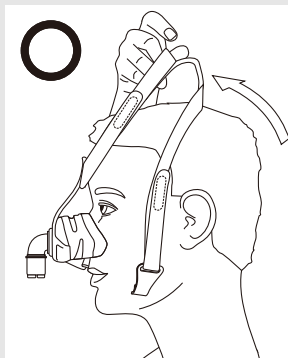



マスクが頬に食い込んでいる場合

マスクが顔と平行になっていますか？
ヘッドギアを顔が圧迫しないところで
とめなおします。

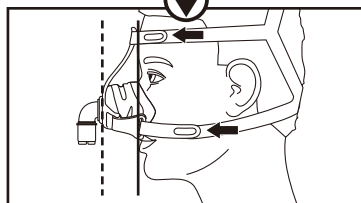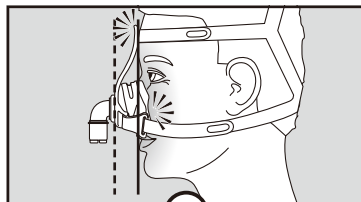



目の周辺に空気漏れがある場合





マスクが顔と平行になっていますか？
ヘッドギアを顔が圧迫しないところで
とめなおします。

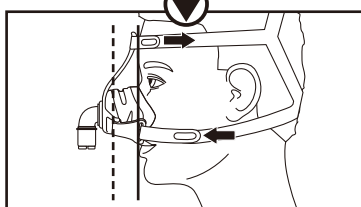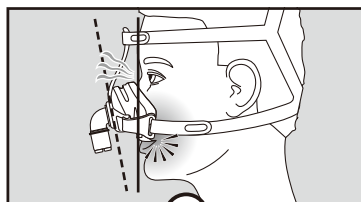

口元の周辺に空気漏れがある場合





マスクが顔と平行になっていますか？
ヘッドギアを顔が圧迫しないところで
とめなおします。

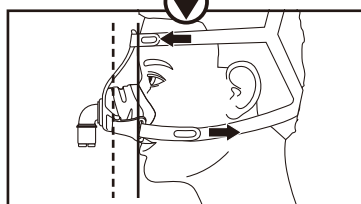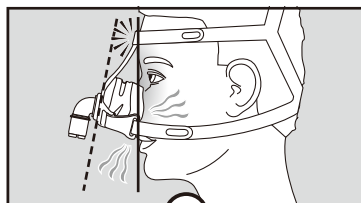

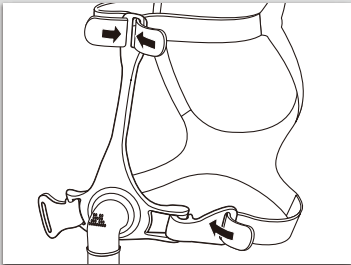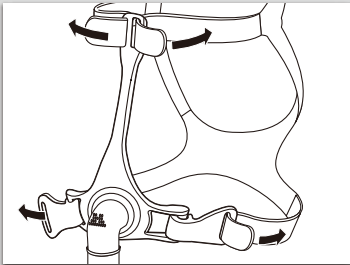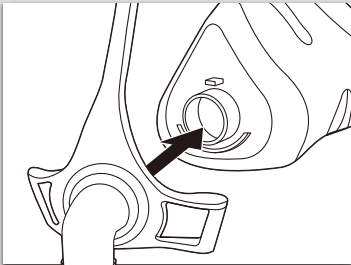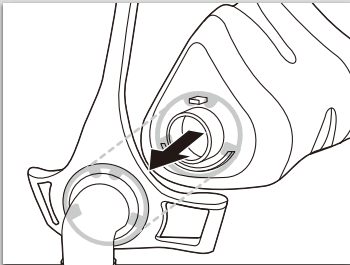部品名	分 解	組み立て
ヘッドギア	ヘッドギアのストラップ部分をフレームから取り外します。 	上部ストラップをフレームの上段に通し、下部ストラップをヘッドギアクリップに通して取り付けます。 
マスクのクッション	マスクフレームから取り外します。 	マスククッションとマスクフレームのツメが合うようにはめこみます。 

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

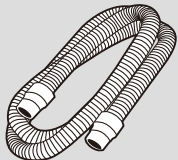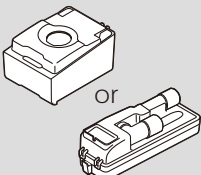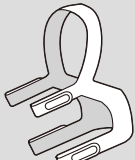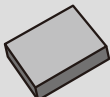頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	 水タンク	中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。
1週間	 ヘッドギア	マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗います。
2週間	 花粉フィルタ(灰色)	必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。




注 意

付属品（マスク・回路など）のお手入れをする際は、以下のことをお守りください。


- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

フィルタの取り付け方法

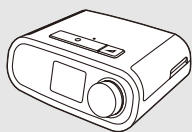

ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

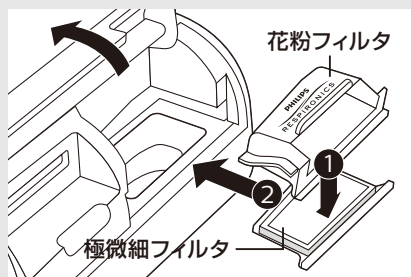

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています


スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス




パソコンから

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある
「個人向け」→「健康」→「呼吸器・睡眠関連機器」→
「患者さん」→「ドリームファミリー」へアクセス

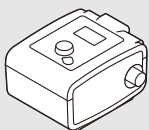

System One
シリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

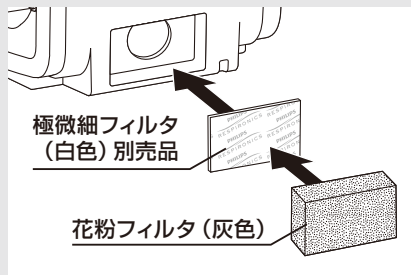

System Oneシリーズの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある
「個人向け」→「健康」→「呼吸器・睡眠関連機器」→
「患者さん」→「CPAP・睡眠検査装置」へアクセス



販売名: ピコネーザルマスク
医療機器届出番号: 11B1X00022000068
一般医療機器

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう
0120-48-4159

受付時間 7:00~22:00 年中無休 365日対応

製造販売業者 **株式会社フィリップス・ジャパン**

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル
www.philips.co.jp/healthcare

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで
※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/SRC-Office

© 2015 Philips Japan, Ltd.

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

PN 1123959/190420 R6-FK

