

販売名	F&P SleepStyle オート(認証番号 229AABZX00080000)		
寸法	高さ144×幅177×奥行183mm		
重量	1.7kg 梱包重量(最大): 2.7kg		
性能	圧力範囲: 4 ~ 20cmH ² O		
ノイズレベル	28.0±1.5dBA		
ウォーターチャンバー容量	380ml(最大注水ラインまで注水した場合)		
適合規格	IEC60601-1{Ed3.1}:2012;ISO80601-2-70:2015		
データ記録	InfoUSB が最大5年間の概要有効性データを保管し、365日の詳細な有効性データと140時間の高解像度圧力、リークおよび流量データを保管します。InfoUSBがない場合、デバイスは、最大1年間の概要有効性データを保管し、30日の詳細な有効性データと20時間の高解像度圧力、リークおよび流量データを保管します。		
電氣的定格仕様	定格供給電圧	定格電流入力	定格供給周波数
	100-115V	1.2A(最大2.5A)	50-60Hz

雲 睡 眠

加温加湿による雲の中で眠るような心地よさ。
クラウドサービスによるデータ管理。
小池メディカルがお届けする睡眠スタイル。



F&P SleepStyle

(本カタログ掲載製品 Fisher&Paykel Healthcare 社製)

いつでも…
加温加湿により季節を選ばず快適に

小池メディカルの選べるCPAPラインアップ。

小池メディカルはFisher&Paykel Healthcare 社製 SleepStyle をはじめ、
みなさんのご要望に応じたCPAPライフを提供します。



Jusmine.J

だれでも…
はじめての患者さんに

承認番号: 22700BZX0024000
発売元: 株式会社小池メディカル / 製造元: 株式会社メトラン



Jusmine.Z

どこでも…
移動の多い患者さんに

承認番号: 229ALBZX00016000
製造販売元: 株式会社小池メディカル

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。



販売元 株式会社 小池メディカル
本 社 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-24-8
03-5662-6605(代)
www.koike-medical.co.jp

製造販売元 フィッシャー&パイクヘルスケア株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2

■ お問い合わせは



小池メディカルがお届けする睡眠スタイル。

小池メディカルは、CPAP療法に関わる医療従事者、患者さんをサポートするために、タッチパネル式の斬新なデザインの“ジャスミン”、出張の多い患者さん向けの“ジャスミンZ”と共に、快適な加湿と患者さんの呼吸への追従性を追求した、Fisher & Paykel Healthcare 社製CPAPをご用意しました。

小池メディカルはみなさんのご要望に応じたCPAPライフを提供します。

ブロア性能向上により、前機種よりもさらに快適になった革新のテクノロジー。



ThermoSmart™

結露の発生をおさえるために、AirSpiral™テクノロジーを採用した熱線入り呼吸チューブ、ThermoSmart™を装備しています。季節を問わず、高度なアルゴリズムと併せて、睡眠中の快適な加湿を提供します。

熱線入り呼吸チューブと
AirSpiral™ テクノロジー



SensAwake™


睡眠中に覚醒を検知すると、自動でCPAP圧をスピーディに減圧して、快適なレベルに調整する機能です。再入眠が容易になり、効果的な治療を継続することができます。



呼吸リリーフ

快適性をより高めるために搭載した、呼吸時に自動でCPAP圧を減圧する機能です。CPAP圧が呼吸に無理なく追従するので、さらに快適に呼吸することができます。

使い勝手を考えたシンプルなデザイン、優れた静音性。

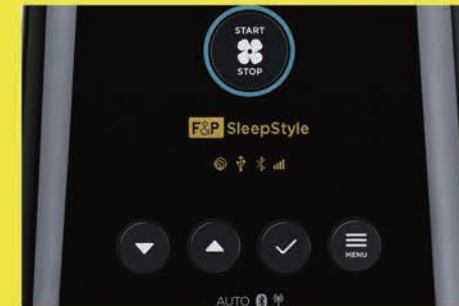

使う人にやさしい、 わかりやすい操作メニュー。

ユーザーの方々の声を反映して、シンプルでわかりやすい操作メニューを実現。セットアップが素早く行え、患者さんでもすぐに使いこなせるよう設計されています。



使いやすさにこだわった、 簡単な操作性。

大型の操作ボタンを本体前面に配置するなど、どなたでも迷うことなく使えるよう配慮して設計されています。治療のスタートやストップも、ボタンを押すだけの簡単操作です。



日々のお手入れも楽に行える ウォーターチャンバー。

給水用のウォーターチャンバーは、本体上部から簡単に取外してできるので、水の充填や洗浄などのお手入れが楽に行えます。



コンパクトで静かだから、 ベッドサイドに置いてもOK。

電源および加湿加湿器を一体型とすることで、コンパクトなサイズを実現。静音性にも優れているので、ベッドサイドテーブルに置いて治療を行えます。

F&P SleepStyle™ オート (SPSAA) 性能特徴

- 加湿加湿器一体型
- 圧力自動調節
- ThermoSmartテクノロジー
- SensAwake
- 呼吸リリーフ
- ランプ
- 自動高度調整
- リーク補正機能
- 有効性レポート
- コンプライアンスの報告
- F&P InfoUSB
- セルラーモデム

F&P SleepStyle オート/CPAPの付属品

キャリーバッグ×1
SleepStyle本体×1
ThermoSmart 熱線入り呼吸チューブ×1
電源コード×1
ユーズ & ケアガイド×1
ウォーターチャンバー×1
チャンバーシール×1
アウトレットシール×1
F&P InfoUSB (Info USB ポートに装着済み) ×1
エアフィルター (デバイスに装着済み) ×1
エアフィルター (スベア) ×1
エルボー (スベア) (標準呼吸チューブと併用) ×1
SleepStyle クイックリファレンスガイド×1

交換部品

900SPS100 ウォーターチャンバー
900SPS101 チャンバーシール
900SPS110 エアフィルター (2個入)
900SPS120 ThermoSmart呼吸チューブ※
900SPS121 エルボー付き標準呼吸チューブ※
900SPS122 標準呼吸チューブ用エルボー
900SPS140 SleepStyle 蓋
900SPS141 アウトレットシール
900SPS142 キャリーバッグ
900SPS164 電源コード (日本用)
900SW101 F&P InfoUSB

取扱説明書

900SPS172 SleepStyle ユーズ & ケアガイド
900SPS173 SleepStyle クイックリファレンスガイド

SleepStyle, ThermoSmart, AirSpiral および SenceAwake は、Fisher & Paykel Healthcare Limited の商標です。特許情報については、www.fphcare.com/jp をご覧ください。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc の登録商標であり、Fisher & Paykel Healthcare はこのマークを使用するライセンスを保持しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者のもです。

※適用部分 -
22mm (0.86 インチ) 円すいコネクタに適合するもの。